

**PREPARATION ET ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS DE PLASMA CONGELE
POUR LES ANALYSES D'HEMOSTASE**

1. Prélèvement :

Le(s) tube(s) citraté(s) doit(ent) être prélevé(s) en première position ou après un tube de purge.

- Remplissage des tubes : idéalement >90%, acceptable >80% (Le(s) tube(s) citraté(s) doit(ent) être rempli(s) correctement afin de respecter le rapport de 9 volumes de sang pour 1 volume d'anticoagulant).

2. Préparation du Plasma Pauvre en Plaquettes (PPP)

La préparation doit être réalisée moins de 2 heures après le prélèvement.

- Centrifuger le ou les tubes citratés ≥ 10 minutes, 2000 à 2500 g, entre 15 et 25 °C.
- Décanter le plasma et centrifuger à nouveau ce tube
- Aliquoter en fractions de 0,5 mL.
- Congélation rapide à -20°C des plasmas destinés aux analyses

3. Quantité d'aliqots

- Prévoir 2 x 0,5 ml plasma citraté congelés.

4. Transport des aliqots de plasma congelé

- Transporter les échantillons congelés en s'assurant du maintien de la congélation pendant toute la durée du transport.

D'après les recommandations pré-analytiques en hémostase du GEHT - Révision partielle octobre 2015